

Criochirurgia

Cryosurgery

CRYO PRO MINI criochirurgia con azoto liquido CRYO PRO MINI cryosurgery with liquid nitrogen







A motivo della sua semplicità di utilizzo, dell'elevata efficacia terapeutica e del basso costo di esercizio la criochirurgia è giustamente considerata, da tempo, il trattamento elettivo di un elevato numero di patologie.

La terapia è poco dolorosa e , nella maggior parte dei casi, non richiede anestesia.

A differenza di altri agenti criogenici l'azoto liquido consente di ottenere il congelamento del tessuto in tempi brevissimi mediante il trattamento sia a spruzzo che a contatto.

La rapidità e l'efficacia dell'azione terapeutica è assicurata dalla temperatura di – 196 °C dell'azoto.

La criochirurgia con azoto liquido è il trattamento di elezione o comunque un trattamento alternativo per verruche, cheratosi attiniche, lentigo simplex, condilumi acuminati, molluschi contagiosi, fibromi penduli, nevi, carcinomi baso cellulari.

ACCESSORI

Punta spray per acne

Consente l'applicazione uniforme, a spazzolamento, di un lieve getto di azoto molto vaporizzato per la desquamazione di un'ampia superficie cutanea (cryopeeling)


Sonda conica a punta aguzza

A motivo della minima superficie di contatto è particolarmente indicata per il trattamento di lesioni puntiformi o comunque di dimensioni molto ridotte

Minisonde (diam. 1,2,3 e 6 mm) Queste sonde consentono un raffreddamento quasi istantaneo della superficie di contatto e, in funzione del diametro utilizzato, possono trovare impiego nel trattamento della maggior parte delle lesioni cutanee





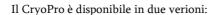

CryoPro Maxi : capacità 500 cc (tempo di permanenza staica: 20 -24 ore)

CryoPro Mini : capacità 350 cc (tempo di permanenza staica: 10-12 ore)

DOTAZIONE STANDARD










Ugelli in ottone

con foro di uscita di diametro diverso (A-B-C-C-D) per la terapia a spruzzo



Fic Instruments Estensore ricurvo

Per il trattamento a spruzzo di lesioni in aree di difficile accesso

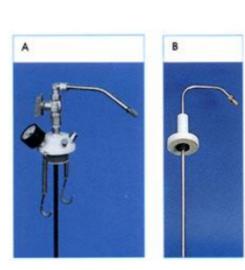



ELETTROFOR s.a.s

V.le della Cooperazione 38-40 45100 Borsea (Ro) Tel.+ 39 0425 474533 Fax+39 0425 474918 info@elettrofor.it www.elettrofor.it